


KIT DU CELLSAVER Sorin® Xtra

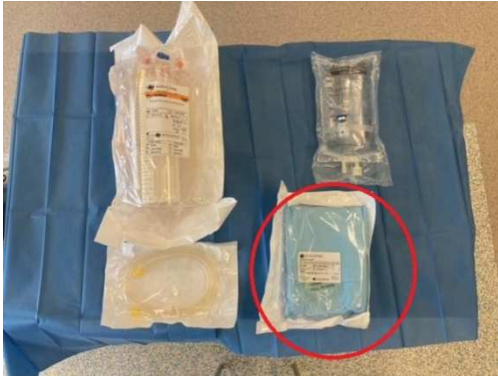

1 Kit d'aspiration :


- En **rouge** la partie stérile à donner au chirurgien
- **A MONTER EN 1^{ER} EN CAS D'URGENCE**



2 Kit traitement et récupération :

- **Jaune** partie lavage
- **Rouge** partie poche de sang traité/autotransfusion
- **Blanc** partie déchets

MONTAGE DU CELL SAVER

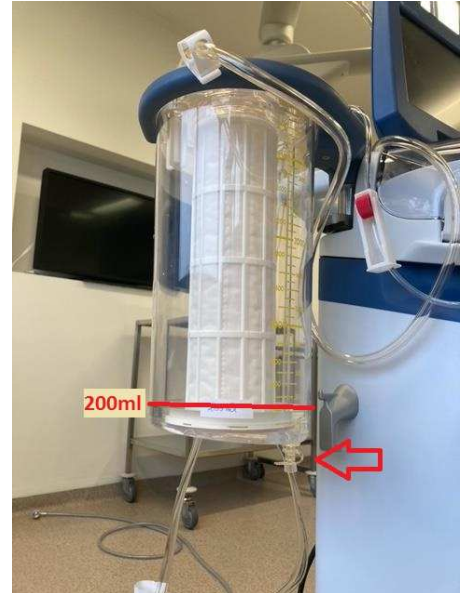

Connecter l'aspiration au vide

Connecter l'aspiration chirurgicale au Sérum physiologique 1000ml + 25 000UI Héparine et à la cuve de récupération (embouts **orange** 45°)

Remplir le bol de récupération de 200ml
Vérifier le bouchon de vidange



Ouvrir le capot




Ouvrir la grille de verrouillage



Enlever la languette plastique
Placer les tubulures



Verrouiller le bocal et la grille
Faire tourner le bocal à la main pour vérifier sa position

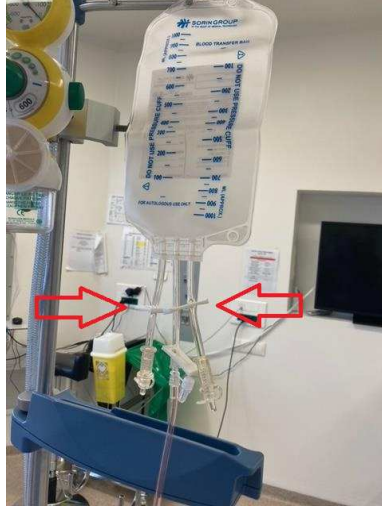

Accrocher la poche de sang traité
(tubulure **rouge**)
Clamper les sorties non connectées



Connecter la poche de déchets
(**blanc**)



Connecter au bocal récupérateur
(**bleu**)



Connecter à la poche de lavage
(**jaune**)



Allumer à l'arrière, valider la mise en place de la tubulure automatique autour du galet

Ready to rumble !